

ジェット、超音波、浸漬にも。  
洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。



ジェットウォッシャー超音波洗浄装置  
MU-7500D

●画像はMU-M510L(8.2Lタイプ)、MU-M510S(3.3Lタイプ)、MU-M050GS(スプレーガン)のイメージです。

## Washer-Disinfector

### アルカリ性洗浄剤

防錆剤配合でアルミ器具に対応  
(無泡性)

ジェットウォッシャー

超音波洗浄

#### MU-M510L MU-M510S

約8.2L 希望小売価格  
17,600円+税

約3.3L 希望小売価格  
8,000円+税

強力なキレート効果により、水の硬度が高い地域でも洗浄効果を発揮します。

#### 仕様

形名	MU-M510L	MU-M510S
成分	無機塩 金属イオン封鎖剤 防錆剤	
液性	アルカリ性 原液:約pH14、0.5%溶液時:約pH11	
外観	微黄色透明液体	
内容量	約8.2L(10kg)	約3.3L(4kg)
梱包形態	1箱 2個入り	1箱 4個入り
梱包寸法(mm)	幅360×奥行286×高さ325	幅472×奥行280×高さ262

#### 使用方法

- 使用濃度:0.5%  
(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)
- 洗浄温度:最適温度40~60℃

チューブ類やスリッパ洗浄に適応  
(抗菌剤配合・低泡性)

超音波洗浄

浸漬

#### MU-M350S

約3.5L 希望小売価格  
6,000円+税

CAE(アミノ酸系カチオン界面活性剤)と、有機窒素硫黄系抗菌剤を配合した洗浄剤です。

#### 仕様

形名	MU-M350S
成分	非イオン界面活性剤(高分子系) グリコール系溶剤 CAE(アミノ酸系カチオン界面活性剤) 有機窒素硫黄系抗菌剤
液性	アルカリ性 原液:約pH13、0.5%溶液時:約pH11.2~12.2
外観	黄色透明液体
内容量	約3.5L(4kg)
梱包形態	1箱 4個入り
梱包寸法(mm)	幅410×奥行269×高さ268

#### 使用方法

- 使用濃度:0.5%  
(汚れの程度により0.5~2.0%の間で希釈してご使用ください)
- 洗浄温度:最適温度40~60℃

ガラス製器具のくもり防止に配慮  
(低泡性)

超音波洗浄

#### MU-M251L

4L 希望小売価格  
5,300円+税

超音波洗浄装置用の洗浄剤です。

#### 仕様

形名	MU-M251L
成分	非イオン界面活性剤 (高分子系) グリコール系溶剤
液性	アルカリ性 原液:約pH13 1.0%溶液時:約pH11.3~12.3
外観	微黄色透明液体
内容量	4L(約4.2kg)
梱包形態	1箱 4個入り
梱包寸法(mm)	幅410×奥行269×高さ268

#### 使用方法

- 使用濃度:1.0%  
(汚れの程度により0.5~2.0%の間で希釈してご使用ください)
- 洗浄温度:最適温度40~60℃



## 酵素配合中性洗剤

中性タイプで被洗浄物の材質に幅広く対応(無泡性)

ジェットウォッシャー

超音波洗浄

### MU-M750L

約8.5L 希望小売価格  
14,800円+税

### MU-M750S

約3.4L 希望小売価格  
7,600円+税

アルミ・銅・真鍮・メッキ処理など、被洗浄物の材質に幅広く対応しています。

#### 仕様

形名	MU-M750L	MU-M750S
成分	サチライシン(酵素)、グリコール系溶剤	
液性	中性 原液:約pH7、0.5%溶液時:約pH7.5~8.5	
外観	微黄色透明液体	
内容量	約8.5L(10kg)	約3.4L(4kg)
梱包形態	1箱 2個入り	1箱 4個入り
梱包寸法(mm)	幅360×奥行286×高さ325	幅472×奥行280×高さ262

#### 使用方法

- 使用濃度:0.5%  
(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)
- 洗浄温度:最適温度40~60℃

## 速乾性潤滑防錆剤

器具表面に均一な保護膜を形成し、潤滑・防錆性を発揮

ジェットウォッシャー

超音波洗浄

### MU-M600L

10L 希望小売価格  
20,500円+税

### MU-M600S

4L 希望小売価格  
8,700円+税

潤滑防錆剤処理後の乾燥時間の短縮、輪染み・ベタつきを抑制。幅広い材質の被洗浄物に対応し、食品添加物などで許可されている成分を使用しています。

#### 仕様

形名	MU-M600L	MU-M600S
成分	非イオン界面活性剤、アルコール、防錆剤	
液性	中性 原液:約pH7、0.3%溶液時:約pH6.0~8.0	
外観	無色透明液体	
内容量	10L(約9.7kg)	4L(約3.9kg)
梱包形態	1箱 2個入り	1箱 4個入り
梱包寸法(mm)	幅360×奥行280×高さ310	幅410×奥行269×高さ268

#### 使用方法

- 使用濃度:0.3%  
(0.2~0.5%の間で希釈してご使用ください)
- 洗浄温度:40℃以上

## 凝固防止洗剤

器具に付着した血液にスプレーして凝固を防止

ジェットウォッシャー

超音波洗浄

浸漬

### MU-M050GS

500mL 希望小売価格  
11,400円+税(1箱 6個入り)

スプレー後、密閉容器に入れることで血液の凝固防止効果が約3日\*持続。当社製の他の洗剤と混合しても洗浄力が低下しません。

\* 使用条件により異なる場合があります。

#### 仕様

形名	MU-M050GS
成分	血液凝固防止剤、潤滑剤、防錆剤 他
液性	中性 原液:約pH7
外観	微黄色透明液体
内容量	500mL(約0.54kg)×6個
梱包形態	1箱 6個入り(スプレーガン2個付属)
梱包寸法(mm)	幅315×奥行165×高さ200

#### 使用方法

- 血液・体液が付着した器具にむらなくスプレーし、汚れがひどい部分には多くスプレーしてください。
- 血液凝固前にスプレーする方がより効果的です。

#### ■使用上の注意

- 洗浄後は速やかにすすぎをしてください。洗剤が凝固すると落ちにくくなります。
  - キャップを開けると、液が飛び出す恐れがあります。容器の移動時や保管時はキャップをしっかり締めてください。
  - 床などにこぼれた場合、速やかに拭き取ってください。
  - 他の容器に移し替えるときは、清浄な耐薬品性容器に品名・用途・用法・注意事項などを明記ください。
  - 当社製洗浄装置には保守・サービスの点からも、当カタログに掲載している洗剤のご使用をおすすめします。
  - 洗浄槽を傷めることがありますから、槽内で排液中和処理をしないでください。
  - ステンレス以外の金属類には使用しないでください。(メーカーにより材質が異なりますので、あらかじめご確認願います。)(MU-M510L/MU-M510S/MU-M750L/MU-M750S/MU-M600L/MU-M600Sは除く)
  - 使用後は、容器に異物が入らないようにキャップを締め、変質を避けるため、直射日光の当たる所や、高温になる場所を避けて保管してください。
  - 使用時は、保護メガネ、マスク、ゴム製または樹脂製手袋を着用してください。
  - 目に入ったときは、直ちに水で15分以上洗い、医師の処置を受けてください。
  - 飲用しないでください。万一飲み込んだときは、牛乳か水を飲ませ直ちに医師の処置を受けてください。
- [MU-M510L/MU-M510Sの場合]  
アルミ器具への配慮はしていますが、事前に変色などの影響がないことをご確認の上、使用してください。
- [MU-M251Lの場合]  
まれに黄変することがありますが洗浄力には影響ありません。ガラス製器具のくもりに対する配慮はしていますが、軟質ガラスは長時間超音波洗浄したとき、くもる場合があります。(60℃を超える液温での長時間洗浄は避けてください)
- [MU-M750L/MU-M750Sの場合]  
漂白剤、アルカリ性、酸性タイプの製品と混ぜないでください。
- [MU-M600L/MU-M600Sの場合]  
・注射器の防錆剤としては使用できません。  
・床などにこぼれた場合、速やかに拭き取ってください。  
・他の薬剤と混ぜないでください。  
・温度変化により分離あるいは白濁することがありますので常温(0~40℃)で保管してください。  
・長時間キャップを開けたままにすると白濁することがあります。開封後は速やかにご使用ください。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

#### ■商品ご理解のために

- 商品のご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。●ご使用前に「洗浄装置本体の取扱説明書」、「安全データシート」をよくお読みの上、正しくお使いください。「安全データシート」は弊社WEBサイト「製品の環境情報」[https://corporate.jp.sharp/eco/data\\_list/greenseal/](https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/) からダウンロード可能です。●当製品の設置、その他ご不明な点は、お買い上げの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画像は全てイメージです。実際の表示とは異なります。●本カタログに掲載された製品の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●本カタログ掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものもありますので、ご注意ください。

<製品に関するご相談>

シャープマーケティングジャパン株式会社  
ビジネスソリューション社

東京 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 電話(050)5213-6458  
大阪 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話(050)5444-7802(代表)  
福岡 〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田2丁目12番1号 電話(092)572-2911(代表)

## シャープ株式会社

本社  
〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



製造販売元  
〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地(奈良事業所)

<https://corporate.jp.sharp>

このカタログの内容は、2023年9月現在のものです。

セン0004 H.3 [MU52309]

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

